


# Embout VarioTherm®


## Monter l'écouteur sur un embout VarioTherm®

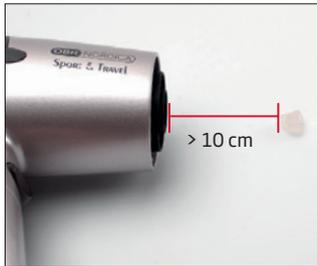


1. Chauffez doucement l'embout en le plaçant à un peu plus de 10 cm du sèche-cheveux.



2. Placez l'écouteur dans l'outil et poussez le fil dans la rainure pour obtenir une fixation stable. Tenez le fil avec un doigt.

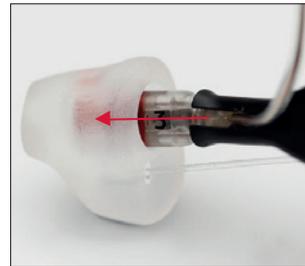


3. Poussez doucement l'écouteur dans l'embout.

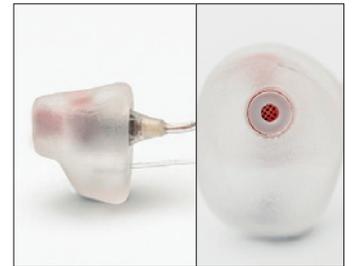

4. Ecouteur en place.


## Retirer l'écouteur d'un embout VarioTherm®

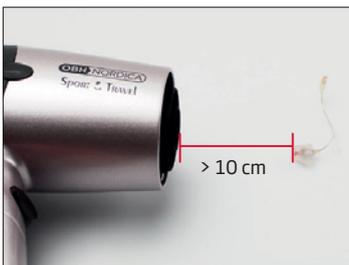

1. Chauffez doucement l'embout en le plaçant à un peu plus de 10 cm du sèche-cheveux.



2. Outils pour écouteurs 60 et 85.

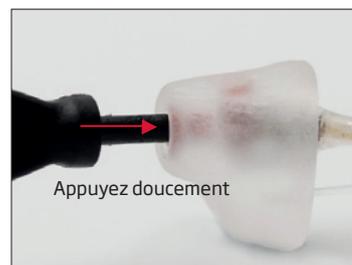

3. Placez l'outil dans l'embout et appuyez prudemment.

## L'embout VarioTherm® dans OASIS<sup>nxt</sup>

Pour les micro-embouts VarioTherm® souples (50 shore), l'évent correspond au même événement que pour les micro-embouts durs.

Pour les Lite Tip VarioTherm® semi-souples (70 shore), il n'existe pas de correspondance exacte dans Oasis nxt.

En effet, l'évent d'un Lite Tip VarioTherm® semi-souple mesure 4 mm, contre 1,5 mm pour un Lite Tip dur. Nous vous conseillons cependant de sélectionner Lite Tip dans le type d'embout.

Pour plus de précision dans le calcul des réglages, nous vous conseillons d'utiliser l'audiométrie in Situ dans Oasis<sup>nxt</sup> 2017.2

**Pour contacter le Service Fabrication / Sav sur-mesure :**



- Ligne dédiée : 01.41.16.11.86

- Fax : 01.70.36.96.20

**Pour vos envois de scan par mail :** [par.ite.france@dgs.com](mailto:par.ite.france@dgs.com)