

GUÍA DE INSTALACIÓN
CÓMO EMPEZAR

TELÉFONO




Finalidad de esta guía

Antes de empezar le recomendamos leer lo siguiente



Antes de poder utilizar los audífonos para mantener conversaciones con el teléfono fijo, hay que conectar el adaptador de teléfono a la línea telefónica y a una toma de corriente.

Esta es una sencilla guía paso a paso de la instalación del adaptador de teléfono.

El paquete incluye todas las piezas necesarias para la instalación.

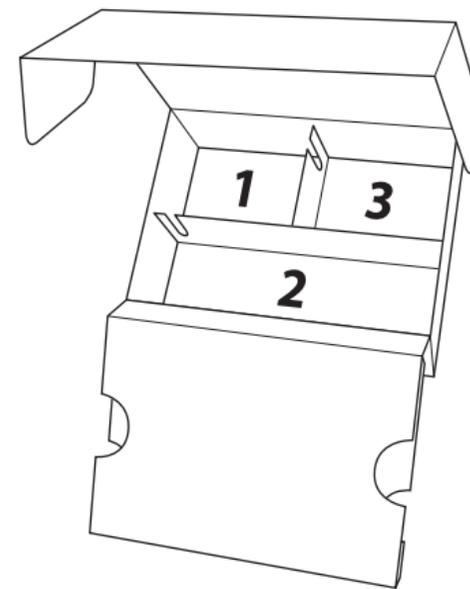

Vista general del adaptador de teléfono

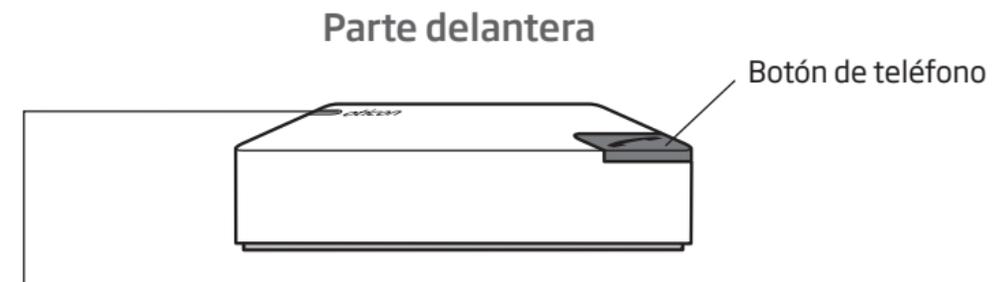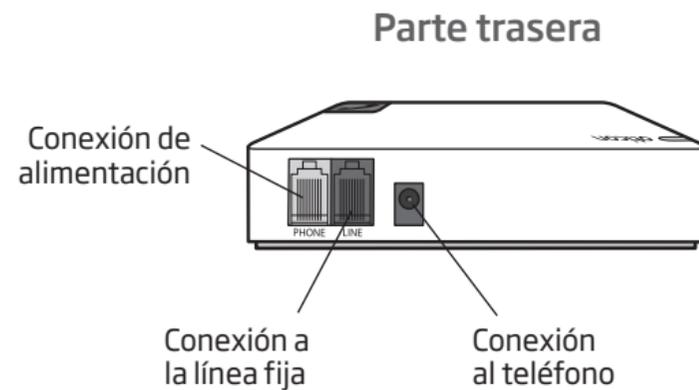

INDICADOR DE ESTADO



Luz	Significado
Fija	Streamer está conectado
Se apaga gradualmente	Buscando Streamer
Intermitente	Emparejamiento
Sin luz	Apagado

Conexión a la fuente de alimentación

Comience la instalación conectando el adaptador de teléfono a un enchufe. Utilice el transformador de la caja n° 1.

- Introduzca el transformador en el enchufe de la pared u otra toma de corriente.
- Introduzca el cable de alimentación en la conexión de alimentación.
- Compruebe que está conectado.

Después de unos segundos el indicador de estado muestra una luz roja que se apaga gradualmente.

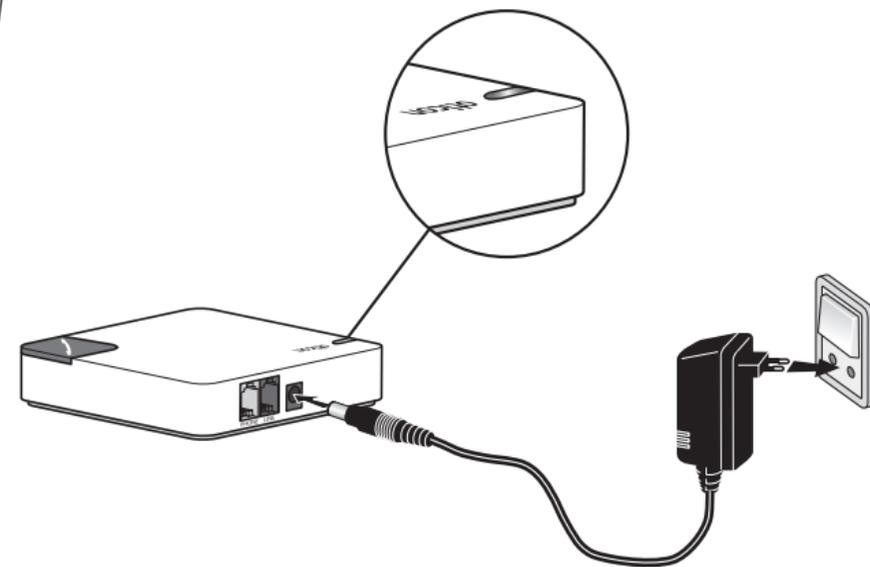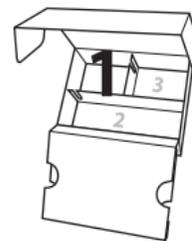

Conexión a la línea telefónica


Conecte el adaptador de teléfono a la línea telefónica y al teléfono. Utilice el cable de teléfono de la caja nº 2. (Las clavijas de conexión son iguales a ambos extremos del cable de teléfono).

Primero hay que desconectar en el teléfono el cable de la línea telefónica que va desde la toma de la pared (o estación base) al teléfono.

1. Saque la línea telefónica del teléfono (o estación base). *
2. Enchufe la línea telefónica en el conector "LINE" (NEGRO) del adaptador de teléfono.
3. Enchufe el cable de teléfono en el conector "PHONE" (AMARILLO) del adaptador de teléfono.
4. Enchufe el otro extremo del cable de teléfono en el teléfono (o estación base). *

La instalación ya está completa. Antes de utilizarlo, hay que emparejar Streamer y el adaptador de teléfono (Vaya a la página siguiente: preparación de Streamer).

** si su teléfono principal o estación base no tiene una clavija extraíble para la conexión telefónica, deberá intentar usar un teléfono alternativo o ponerse en contacto con un técnico para completar la instalación.*

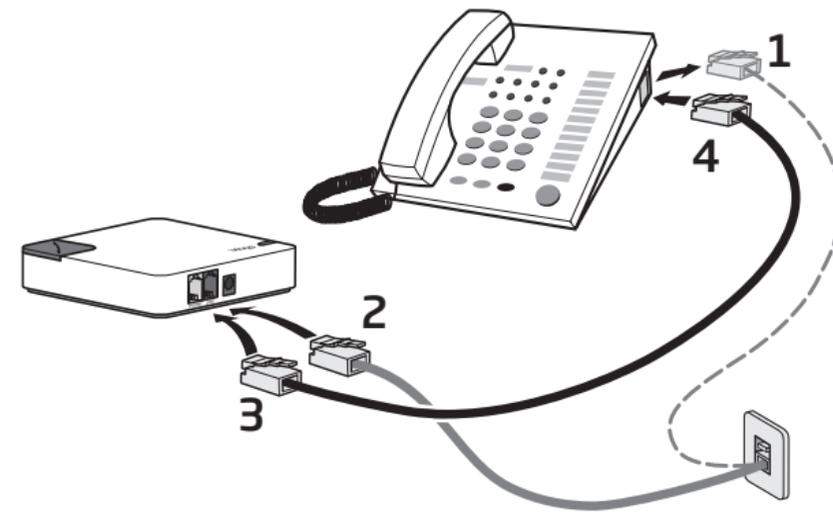

Preparación de streamer

La primera vez que se utilice Streamer con el adaptador de TV, tiene que emparejar ambos aparatos.

Emparejamiento

1. Para emparejar el adaptador de teléfono y Streamer deberá colocar juntos ambos aparatos y activar el modo de emparejamiento.
2. Pulse el botón de conexión de Streamer durante 5 segundos hasta que la luz azul empiece a parpadear.
3. Pulse el botón rojo Phone del adaptador de teléfono durante 5 segundos hasta que parpadee el indicador rojo de estado.
4. Antes de un minuto el adaptador de teléfono se conectará a Streamer y se completará el emparejamiento.
 - la luz roja del indicador de estado del adaptador de teléfono emite una luz fija.
 - la luz azul del botón de conexión de Streamer emite una luz constante durante 5 segundos y luego se desvanece lentamente.

El emparejamiento se hace solamente una vez y normalmente no hay necesidad de repetirlo.



Soporte técnico y consejos

Coloque el adaptador de televisión en un lugar adecuado cerca del teléfono fijo o estación base. Consulte la guía del usuario si desea más información sobre la forma de utilizar el teléfono fijo a través del adaptador de teléfono y Streamer.

Cómo se apaga el adaptador de teléfono

Si no quiere recibir llamadas telefónicas en Streamer, apague el adaptador de teléfono desconectándolo de la red. Con un uso normal, el adaptador de teléfono consume muy poco y no es necesario apagarlo.

Alcance del adaptador de teléfono

El adaptador de teléfono tiene un radio de alcance de unos 10 metros, dependiendo de los muebles y de su colocación. Dentro de este radio de alcance puede mantener conversaciones telefónicas manos libres con Streamer.

Si desea ayuda técnica o recomendaciones de uso, consulte la información sobre ConnectLine en www.oticon.com/connectline

Garantía internacional

El adaptador de teléfono está cubierto por una garantía limitada emitida por el fabricante durante un periodo de 12 meses a contar desde el día de la compra original. Es posible que en su país se aplique una ampliación de la garantía. Si desea más información consulte a su audioprotesista.

Qué cubre la garantía

Cualquier componente electrónico que, debido a un defecto de fabricación, mano de obra o diseño, deje de funcionar adecuadamente en condiciones de uso normal durante el plazo de esta garantía, será sustituido o reparado sin ningún tipo de coste por las piezas o la mano de obra cuando se devuelva al punto de compra.

Si se determina que no es posible la reparación, se sustituirá toda la unidad por otra equivalente tras el acuerdo mutuo entre el cliente y el audioprotesista.

Qué no cubre la garantía

Los problemas que surjan por una manipulación o cuidado inadecuados, uso excesivo, accidentes, reparaciones realizadas por terceros no autorizados, exposición a condiciones corrosivas o daños debidos a la introducción de objetos extraños en el aparato, NO están cubiertos por la garantía limitada y pueden anularla. Esta garantía no afecta a ningún derecho legal que usted pudiera tener según la legislación nacional aplicable sobre la venta de bienes de consumo. Su audioprotesista puede haber emitido una garantía que exceda las cláusulas de esta garantía limitada. Si desea más información, consulte a su audioprotesista.

Homologación del producto, precauciones y marcado

La potencia de emisión del adaptador de teléfono está por debajo de los límites internacionales de emisión para exposición humana.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Este aparato cumple con la Parte 68 de las normas FCC y los requisitos adoptados por ACTA.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable de dar conformidad podrían anular la potestad del usuario para manejar el equipo. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar mal funcionamiento al mismo. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de dar conformidad podrían anular la potestad del usuario para manejar el equipo. De conformidad con la normativa de exposición RF de FCC, el aparato y la antena del mismo tienen que instalarse de forma que se garantice una distancia mínima de separación de 20 cm del cuerpo de cualquier persona. Deben evitarse otras configuraciones de funcionamiento.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las

instrucciones, puede causar una interferencia nociva en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causara una interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o recolocque la antena receptora.*
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.*
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquél al que se ha conectado el receptor.*
- Consulte al vendedor o a un técnico cualificado.*

Declaración de IC:

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- 2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a la radiación IC: Este equipo cumple los límites IC de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. El usuario final tiene que seguir las instrucciones específicas de funcionamiento para garantizar la conformidad con las normas de exposición RF. Este transmisor no se puede colocar ni manejar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Por la presente, Oticon declara que este adaptador de teléfono cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.

La declaración de conformidad está disponible en:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.com

 Este producto está diseñado para su conexión al sistema público de telefonía analógica y puede funcionar en los países de la UE y la AELC.

Utilice la siguiente fuente de alimentación en modo conmutado (SMPS) con su adaptador de teléfono:
Sunlin SLA-A142DA, Entrada: 100-240 V CA 200 mA 50-60 Hz, Salida: 5 V CC 700 mA



Los residuos de aparatos electrónicos deben eliminarse siguiendo la normativa local.

Advertencias

El adaptador de teléfono no es un juguete y, por tanto, debe mantenerse fuera del alcance de los niños u otras personas que puedan tragar alguna pieza o causarse daños de cualquier otra forma. Se debe prestar especial atención a los componentes más pequeños para evitar que los niños puedan tragarlos y asfixiarse.

Acuda inmediatamente al médico en caso de ingestión de alguna pieza.

La seguridad en el uso del adaptador de teléfono con cable de entrada auxiliar está determinada por la fuente externa de señal. Cuando el cable de entrada está conectado a equipos enchufados a la red eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir las normas de seguridad IEC-60065, IEC-60601 u otras equivalentes.

El adaptador de teléfono ha sido diseñado para cumplir las normas internacionales más estrictas de Compatibilidad Electromagnética. No obstante, el adaptador de teléfono podría causar interferencias con otros dispositivos médicos.

Póngase en contacto con el personal adecuado para obtener un permiso de utilización del adaptador de teléfono en hospitales y lugares similares.

112523ES/12.10



MIX
Paper
FSC FSC® C043970

People First

People First es nuestra promesa para ayudar a las personas a comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y participar de forma activa