


OTICON Genie 2

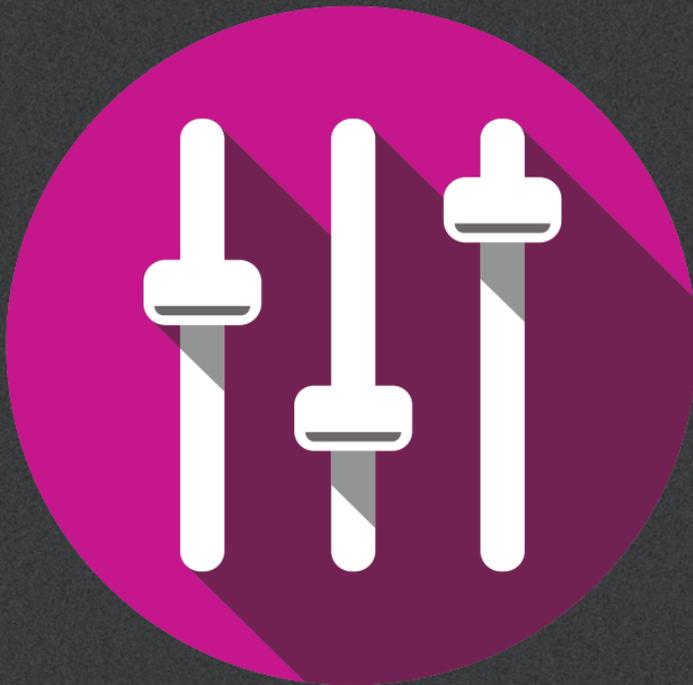

**Quelles sont les
nouveau tes de Genie 2?**
2017.2

Introduction

Genie 2 et Genie ont été mis à jour avec toute une série de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Vous trouvez un aperçu de ces nouveautés aux pages suivantes.

Quelles sont les nouveautés de Genie 2 ?

| Prise en charge d'un nouveau produit

Genie 2 supporte maintenant ConnectClip.

Pour plus d'informations sur ConnectClip, veuillez vous référer aux données techniques disponibles via Genie 2.

ATTENTION

Les nouvelles aides auditives que vous recevez peuvent être dotées d'une nouvelle version de micrologiciel qui n'est pas compatible avec votre ancienne installation Genie 2. Vous devez donc toujours installer le logiciel Genie 2 le plus récent dès que vous le recevez d'Oticon.

I Nouvelles fonctionnalités d'adaptation

Afin de supporter les aides auditives Oticon Opn, Genie 2 a été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Les aides auditives Oticon Opn sont offertes pour tous les niveaux de performance :

- Audiométrie in situ
- Mode d'adaptation pédiatrique
- Compatibilité Noahlink Wireless
- Affichage rapide des données
- Mise à jour des rapports imprimés

Les aides auditives Oticon Opn précédemment achetées devront être mises à niveau pour supporter l'audiométrie in situ. On effectue cette mise à niveau en utilisant l'outil Oticon Firmware Updater, qui met à jour les aides auditives au micrologiciel le plus récent (2017.2).



I Audiométrie in situ

L'audiométrie in situ est désormais disponible pour toutes les aides auditives Oticon Opn. Vous pouvez maintenant vérifier la perte auditive de vos clients en utilisant n'importe quelle sélection acoustique.

Le logiciel d'adaptation peut utiliser les niveaux auditifs mesurés pour mieux s'adapter à l'aide auditive spécifique et à la perte auditive du client.

L'outil inclut également d'autres options telles que la présentation de stimuli sonores (effectuée au moyen de la souris) pour une présentation discrète.

I Mode d'adaptation pédiatrique

Le mode d'adaptation pédiatrique fournit un moyen centralisé de voir les paramètres de l'aide auditive d'un enfant.

Avec le nouveau panneau pédiatrique, vous disposez non seulement d'une vue d'ensemble des paramètres de l'aide auditive, mais vous pouvez aussi les modifier instantanément.

Judicieusement placé dans la section Adaptation, à droite de la barre de navigation supérieure, le panneau pédiatrique vous permet d'y accéder peu importe ce sur quoi vous travaillez.

Le mode d'adaptation pédiatrique est activé par défaut pour tous les clients âgés de moins de 18 ans, mais peut être modifié dans la section Préférences.

**child
friendly
hearing
care**

| Compatibilité Noahlink Wireless

En utilisant le dispositif de programmation Noahlink Wireless, vous pouvez maintenant adapter les aides auditives Oticon Opn. Noahlink Wireless est le nouveau dispositif de programmation de référence du secteur pour les aides auditives compatibles Bluetooth à basse consommation.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section Aide sur Genie 2 dans le logiciel d'adaptation.

| Affichage rapide des données

L'affichage rapide des données est la nouvelle fonctionnalité ajoutée au système NOAH 4.7, que vous pouvez désormais utiliser avec Genie 2. Il vous permet d'accéder rapidement et facilement aux détails de la session d'adaptation sans avoir à démarrer le logiciel d'adaptation.

| Nouvelles possibilités des rapports imprimés

Nous avons amélioré les rapports imprimés afin de mieux répondre à vos besoins quotidiens. Les rapports peuvent être envoyés à votre client par courriel ou enregistrés en format PDF. Vous pouvez maintenant personnaliser la page de titre avec les détails de votre centre.

Le rapport imprimé existant du client a été mis à jour et inclut désormais ce qui suit

- Guide rapide sur les acouphènes : pour les clients chez qui Tinnitus SoundSupport™ est activé
- Comment appairer des accessoires : pour donner à votre client un aperçu rapide de la façon d'appairer les aides auditives Oticon Opn avec des accessoires
- Manipulation et entretien : informations de base qui aident votre client à démarrer avec ses nouvelles aides auditives Oticon Opn
- Perte auditive et communication : pour aider votre client à comprendre ses difficultés et besoins auditifs

C€ 0543

PROMO-0-121 / 2017.12.05 / Ver.1.0

Fabriquant :

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

**Fabriquant local
et distributeur :**

Oticon Canada
1-6950 Creditview Road
Mississauga, ON L5N 0A6
www.oticon.ca

oticon
PEOPLE FIRST