

# 5 Tipps für wiederaufladbare Oticon Opn Hörsysteme

- 1. Laden**                   Laden Sie die Hörsysteme regelmäßig, z.B. nachts, vollständig auf, d.h. bis die LEDs an der Ladestation konstant grün leuchten.
  
- 2. Akku leer**               Wenn ein Akku leer ist und das Hörsystem keine Funktion mehr hat, öffnen und schließen Sie NICHT das Batteriefach, um es weiter zu betreiben. Sondern:
  - a. Setzen Sie das Hörsystem in die Ladestation (am Netz angeschlossen) oder
  - b. Legen Sie eine herkömmliche Batterie in das Hörsystem ein und bewahren Sie den Akku sicher auf, um ihn später aufzuladen.
  
- 3. Keine Nutzung**       Wenn Sie ein Hörsystem längere Zeit nicht tragen oder wenn Sie ein Hörsystem in eine Trockenbox legen, nehmen Sie den Akku komplett heraus.  
  
*Hinweis: Vermeiden Sie es, den Akku bei geöffnetem Batteriefach im Hörsystem zu lassen. Das verkürzt die Lebensdauer des Akkus.*
  
- 4. Handhabung**           Bewahren Sie Akkus nicht zusammen mit metallischen Gegenständen, wie z.B. Schlüsseln oder Münzen, auf.
  
- 5. Pflege**                   Entfernen Sie mit einem weichen Tuch jegliche Feuchtigkeit von den Hörsystemen und der Ladestation, bevor Sie den Ladevorgang starten. Verwenden Sie keinen Reinigungsalkohol oder andere chemische Substanzen.

