

Obtenga el mayor beneficio sus audífonos



CONECTIVIDAD



El compañero ideal

Con Oticon ConnectLine podrá sacar el máximo partido a sus audífonos Oticon en más situaciones. Gracias a este sistema podrá conectarse mejor a la vida: a las personas, a la información y al entretenimiento.

¿Qué es ConnectLine?

ConnectLine es una familia de dispositivos que le ayudan a conectarse a una gran variedad de opciones de comunicación y entretenimiento, y que transforman sus audífonos en unos auriculares inalámbricos.

Con Oticon ConnectLine podrá obtener el mayor beneficio posible de sus audífonos en más situaciones. ConnectLine puede mejorar distintas experiencias de escucha y comunicación. Por ejemplo las conversaciones telefónicas o la comunicación personal en situaciones ruidosas.

Hable hoy mismo con su audioprotesista y pruebe ConnectLine.



Mando a distancia



Móvil



TV



Micrófono



Ordenador



Teléfono



Música



MiniJack



Bucle



App

Streamer Pro: el corazón de ConnectLine

Streamer Pro es una puerta de acceso a diferentes equipos electrónicos. Y no sólo eso: a través del Streamer Pro se puede transmitir a los audífonos prácticamente cualquier fuente de audio. El Streamer Pro se lleva colgado del cuello y tiene tres botones de fácil manejo, con los que se controlan las funciones principales: teléfono, televisión y micrófono.


El Streamer Pro funciona también como un mando a distancia para los audífonos, con el que se puede cambiar de programa o ajustar el volumen fácilmente.

También podrá utilizar este dispositivo para acceder a la aplicación de ConnectLine, que le ofrecerá una forma discreta e intuitiva de controlar sus audífonos y todo el sistema ConnectLine.

Streamer Pro:

- ▶ Es fácil de usar
- ▶ Mejora la comunicación convirtiendo los audífonos en unos auriculares inalámbricos
- ▶ Puede conectarse hasta con 8 dispositivos, como reproductores de MP3, ordenadores, etc.
- ▶ Es un sistema integrado. Sus características avanzadas le permiten, por ejemplo, recibir y atender una llamada de teléfono mientras ve la televisión
- ▶ Sirve como mando a distancia de los audífonos
- ▶ Acceso a la aplicación de ConnectLine



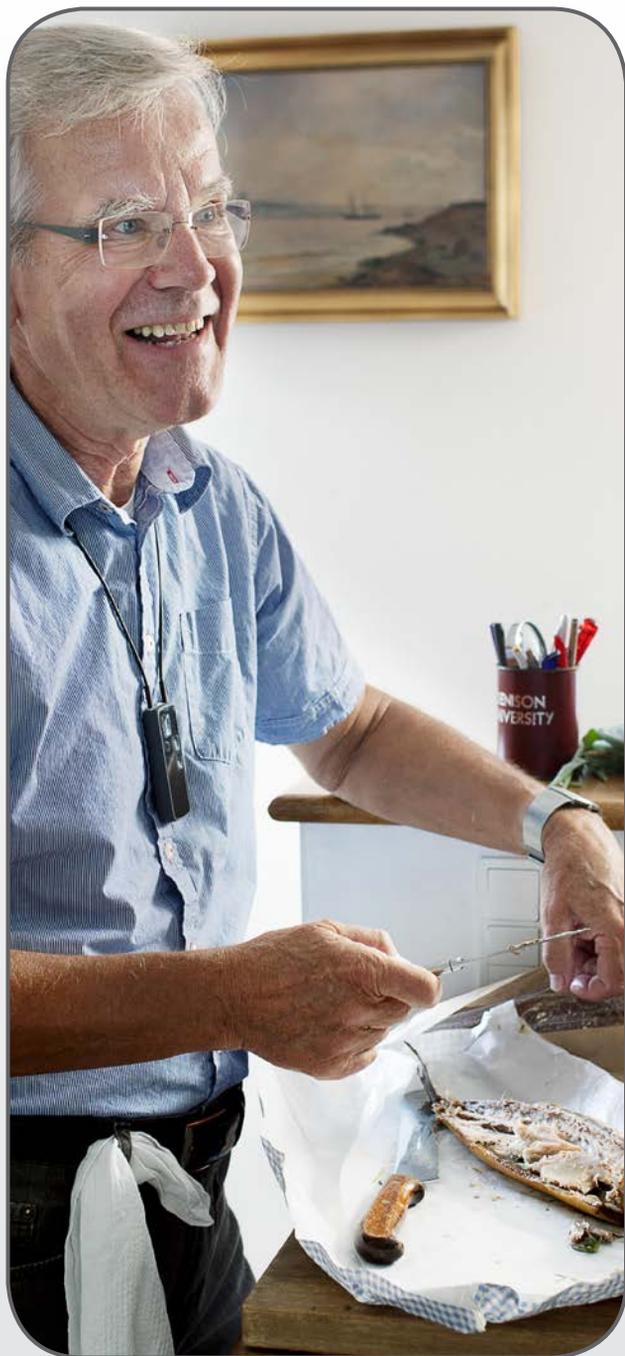

Comunicación sencilla

Teléfono fijo

Olvídese de correr a coger el teléfono. No pierda llamadas. No se preocupe del feedback.

El adaptador de teléfono ConnectLine Phone funciona con su actual teléfono fijo y convierte los audífonos en un kit de manos libres inalámbricos. No tendrá que levantarse a coger el teléfono. Para atender una llamada, lo único que tendrá que hacer es pulsar un botón del Streamer Pro.

Videoconferencia

¡Participe en videoconferencias* dentro de su localidad o a través del mundo con familiares y amigos!

ConnectLine le permite conectar el Streamer Pro a su ordenador de forma sencilla e intuitiva. El sonido se envía directamente a sus audífonos, de modo que usted pueda escuchar y mantener con facilidad conversaciones claras y nítidas a través de Internet.

Conecte el Streamer Pro directamente al ordenador con un cable o mediante una conexión inalámbrica... y empiece a chatear.

**Por ejemplo, Skype y FaceTime, desde un ordenador*



Disfrute del entretenimiento

ConnectLine amplía sus posibilidades de entretenimiento y le conecta a la televisión, la radio, la música y a muchas más cosas. En solitario o en familia.

Ver la televisión

Con ConnectLine disfrutará del sonido de la televisión con excelente calidad y con una nueva dimensión de libertad. Relájese y escuche el resultado de los partidos, las noticias y los chistes. ¡No se perderá nada!

Oirá claramente el sonido y la televisión podrá estar a un volumen del que disfrute toda la familia. Los audífonos son sus auriculares personales y el Streamer Pro es un control de volumen sólo para usted.

El adaptador de televisión ConnectLine TV 2.0 transmite el sonido de la televisión directamente al Streamer Pro y, desde allí, a los audífonos.

ConnectLine TV2.0 funciona con el sonido analógico, digital (PCM) y Dolby Digital®, haciéndolo compatible con una gran variedad de televisores y sistemas de home cinema¹⁾.

Escuchar música y otras fuentes de audio

Streamer Pro le proporciona una conexión estable, robusta y sin problemas con las tecnologías de ocio más populares: desde reproductores de MP3 hasta otras fuentes de audio como ordenadores o audiolibros. La música y el audio se transmiten directamente a sus audífonos.

¹⁾ Consultar las especificaciones de ConnectLine TV 2.0 (www.oticon.com/tv) y el manual de su televisor para asegurarse de que sean compatibles.

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Salga y disfrute...

Escuchar las voces que nos interesan puede ser difícil cuando nos encontramos en espacios públicos. Por ejemplo, en la calle, en un restaurante, en la iglesia o en una conferencia. Con frecuencia, si hay mucho ruido necesitamos una “ayuda extra”. ConnectLine le ofrece soluciones muy efectivas para que esas situaciones resulten menos problemáticas.

El micrófono ConnectLine

ConnectLine Microphone es un pequeño y discreto micrófono inalámbrico que puede llevar la persona con la que usted habla. Le ayuda a entender mejor lo que le dicen en situaciones en las que su interlocutor esté alejado, haya ruido alrededor, o con una combinación de ambas circunstancias.

Teléfono móvil

El Streamer Pro le ayuda a realizar y recibir llamadas en su teléfono móvil. De forma clara, segura y sin complicaciones. Los audífonos se convierten en un kit de manos libres inalámbrico con el que podrá oír y entender mejor la conversación.

El Streamer Pro puede conectarse a una gran variedad de teléfonos móviles con Bluetooth integrado

Sistemas de bobina de inducción

Acceda fácilmente a los sistemas de bucle de inducción de teatros, salas de conferencias y otros espacios. La bobina integrada del Streamer Pro le conecta a los sistemas de bucle de inducción con sólo pulsar un botón.



Mejore la comunicación mientras **conduce**

A veces, conducir un coche mientras habla con otra persona o por teléfono puede ser todo un desafío. Con ConnectLine, todo es más fácil.

Teléfono móvil

El Streamer Pro transmite el sonido del teléfono con claridad y de forma inalámbrica a los dos audífonos simultáneamente. Podrá hablar por el móvil sin esfuerzo... ¡y podrá hacerlo sin soltar las manos del volante!

Charlar mientras conduce

Si su interlocutor se pone el micrófono ConnectLine, podrán charlar mientras usted se concentra en la conducción. El micrófono transmite la voz de su interlocutor a los audífonos de forma inalámbrica. Escuchará un sonido claro y directo, y no tendrá que mirar a su acompañante para entender lo que le dice.



Controle fácilmente sus audífonos con el sistema ConnectLine

Aplicación de ConnectLine

Con nuestra aplicación gratuita de ConnectLine puede controlar sus audífonos y el sistema ConnectLine a través de su iPhone®, iPad®, iPod touch® y dispositivos Android™, todo ello sin aumentar el consumo de la pila.

La aplicación de ConnectLine funciona con todos los audífonos inalámbricos de Oticon.

Disfrute sus funciones y características:

- ▶ Mando a distancia intuitivo y discreto para sus audífonos
- ▶ Ajuste el volumen de forma sencilla y elija y dé nombre a sus programas preferidos
- ▶ Una visión clara del sistema ConnectLine en todo su conjunto
- ▶ Selección fácil de las fuentes de entrada
- ▶ Personalice de forma sencilla las características del sistema ConnectLine según sus necesidades

Disponible de forma gratuita en la App Store y Google Play™



Para más información visite www.oticon.es/app

La aplicación ConnectLine para iPhone, iPad o iPod touch es compatible con iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini con pantalla Retina, iPad mini, iPad (3ª y 4ª generación), iPad 2 y iPod touch (5ª generación) y requiere un Streamer Pro 1.2 App o posterior. Al instalar la aplicación ConnectLine en iPad, busque las aplicaciones de iPhone en la App Store.

La aplicación ConnectLine para smartphones y tabletas Android requiere un Streamer Pro con firmware 1.3 o posterior.

Visite www.oticon.es para más detalles sobre compatibilidad.

People First

People First es nuestra promesa de ayudar a las personas a comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y participar de forma activa

